


Uma sessão é um conjunto de atividades. A criação de sessões permite que você planeje seu trabalho em poucos minutos e elabore uma intervenção personalizada. A seguir, ajudamos você a descobrir como aproveitar ao máximo as sessões.

1. Seleciona "Sessões digitais"



Para começar, clique em "Sessões" e depois em "Sessões digitais" no lado esquerdo da tela.

2. Clique em "Nova sessão digital"

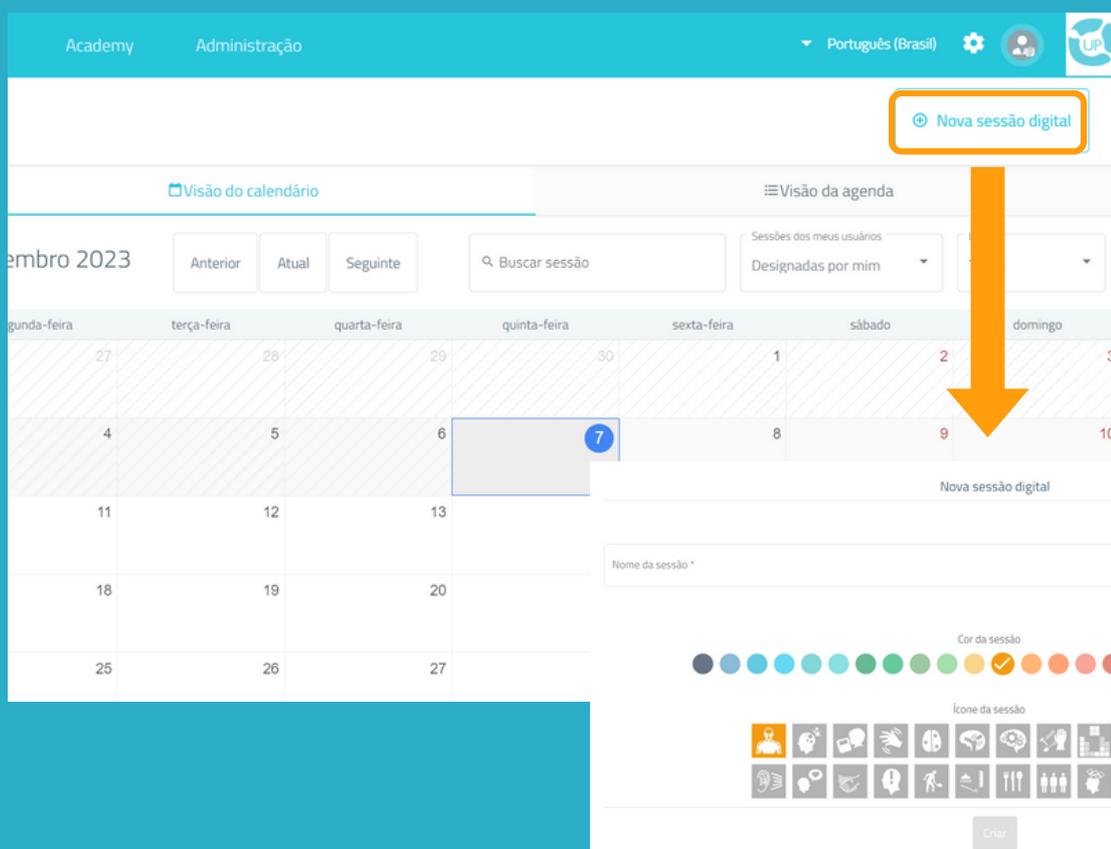

Depois de clicar em "Nova sessão digital", a janela a seguir será exibida:

3. Preenche a informação básica da sessão

1. Dá um nome para a sua sessão.
2. Escolhe um ícone e uma cor.

Opcional:

- Clica em "Opções avançadas".
- Adiciona **etiquetas**: isso ajudará você a encontrar a sua sessão com mais facilidade.
- Adiciona uma **descrição da sessão**.
- Ativa ou desativa **ações avançadas**.

3. Clica em "Criar".

4. Filtra as atividades

A base da sessão está criada, agora você precisa adicionar as atividades que deseja.

Para fazer isso, você pode filtrar as atividades por funções cognitivas, por tipo de atividade (gerador, ficha ou jogo) ou por idade.

5. Escolha as atividades




Depois de filtrar as atividades, basta clicar naquelas que deseja adicionar à sua sessão.

As atividades selecionadas aparecerão no lado esquerdo da tela à medida que você as adiciona.

*É possível adicionar a mesma atividade várias vezes, se você desejar.

Altere a ordem das atividades (opcional)

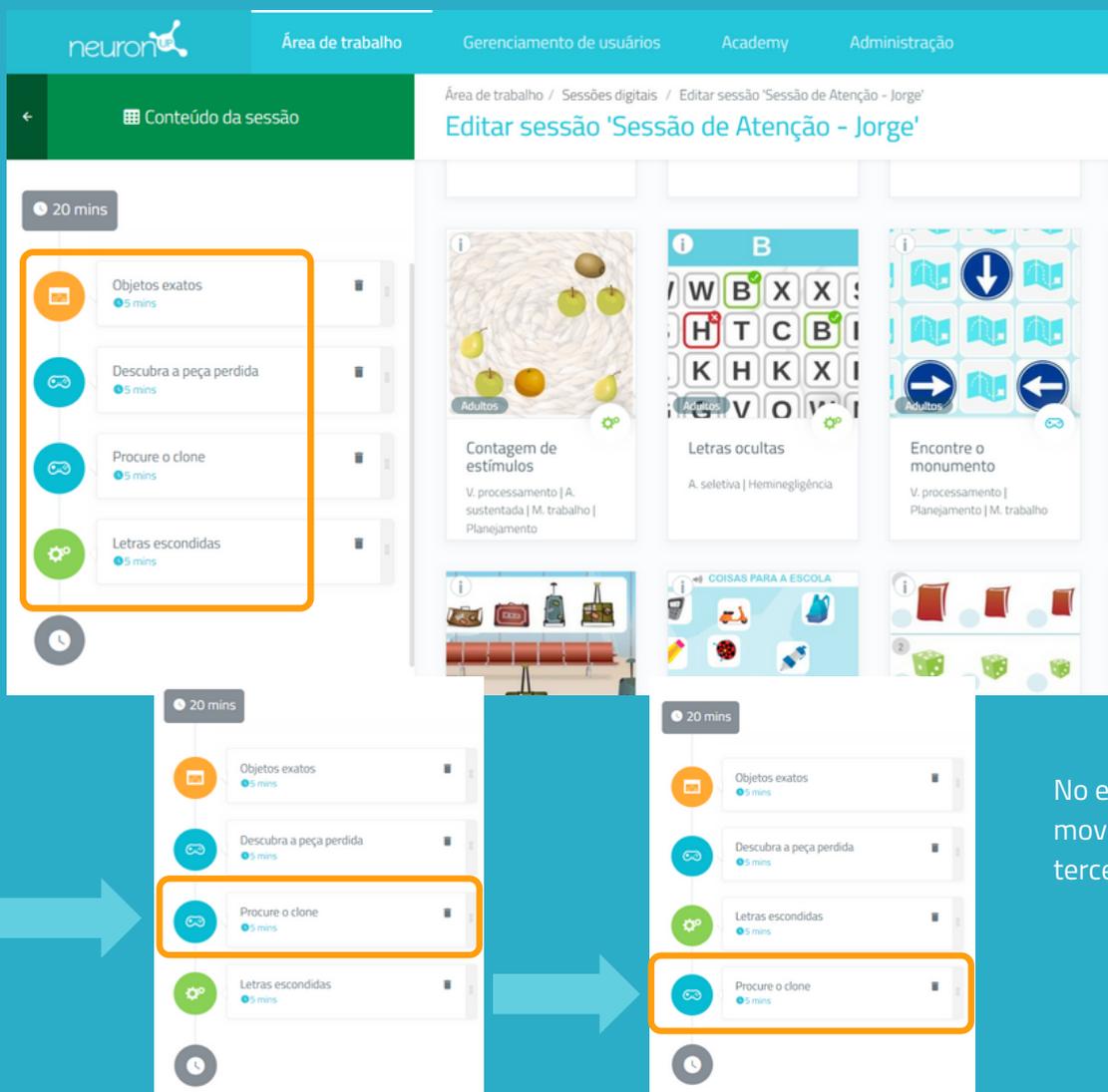

Você pode alterar a ordem das atividades.



Basta pressionar e manter pressionada a atividade e movê-la para o local desejado.

No exemplo à esquerda, movemos uma atividade do terceiro lugar para o último.

6. Configura as atividades (opcional)

Por padrão, cada atividade durará 5 minutos e o usuário começará no nível em que parou pela última vez, ou no nível mais baixo, se nunca tiver trabalhado com a atividade em questão. Para configurar essas definições, basta clicar em cada atividade e alterar as configurações, conforme mostrado abaixo:

Gerador

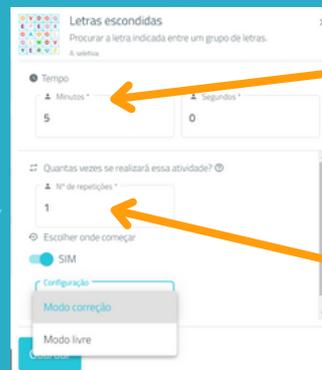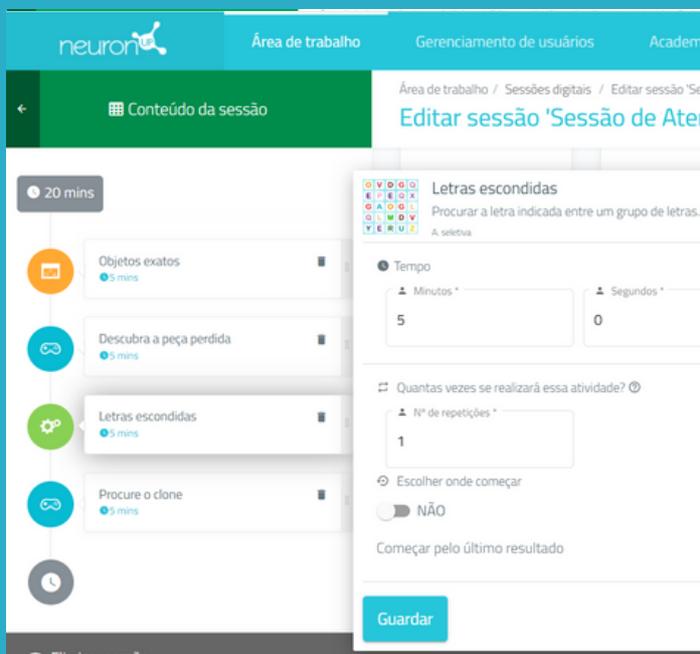


Define o tempo de trabalho

Esta atividade é um gerador, portanto, você pode adaptar o número de repetições*.

Você pode selecionar a personalização criada anteriormente para o Pedro.

**No caso dos geradores, é importante aumentar o número de repetições se quiser que o usuário realmente trabalhe durante o tempo selecionado. Caso contrário, quando o usuário concluir a repetição, ele passará para a próxima atividade, independentemente do tempo.*


Jogo

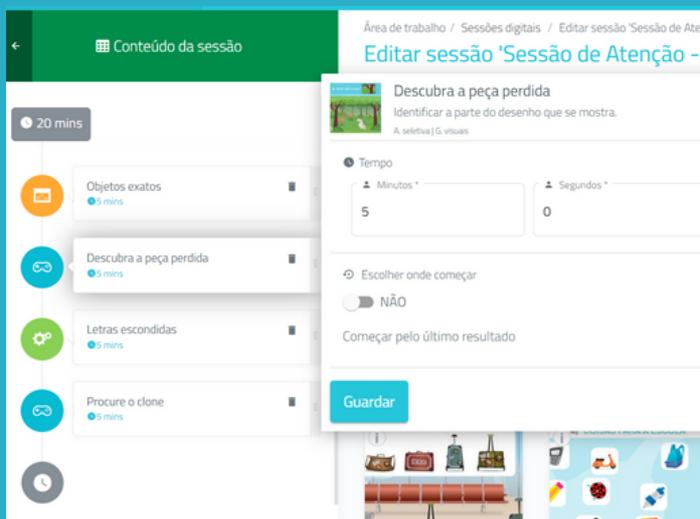

Para jogos, o processo é semelhante.

A diferença é que você pode determinar o nível em que o usuário começa.

Ficha

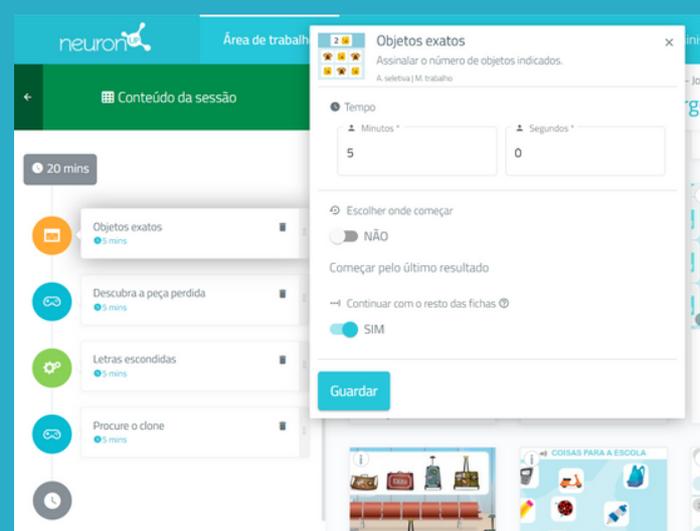


Para as fichas, o processo é idêntico ao dos jogos.

A diferença é que você não pode escolher a personalização, porque não é possível personalizar uma ficha.

Não se esqueça de clicar em "Guardar" sempre que personalizar uma atividade.


7. Guarda a sessão

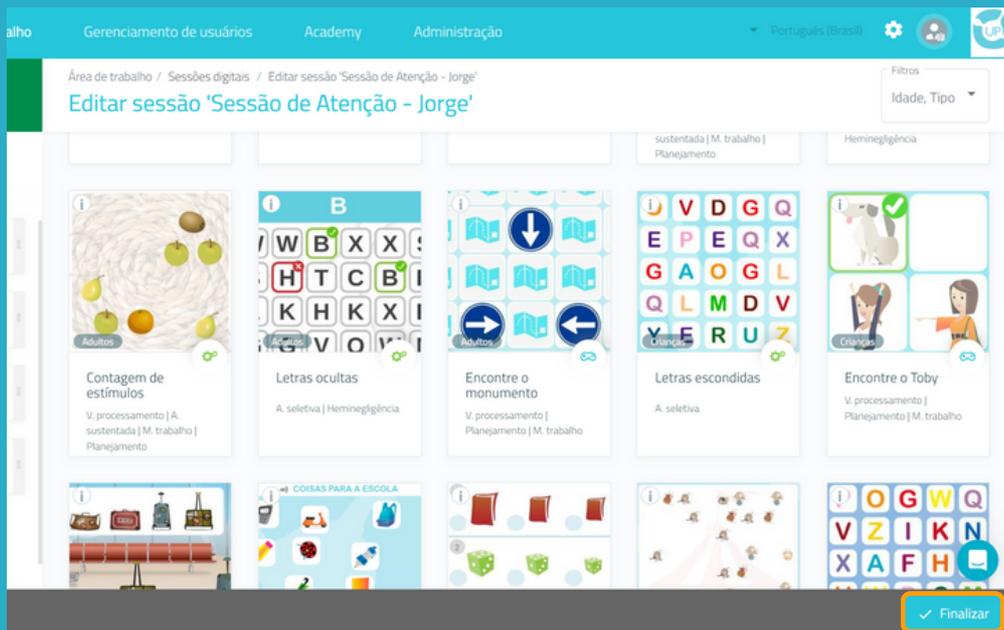


Quando a sessão estiver configurada, clique em "Finalizar" no canto inferior direito para salvar a sessão.

Você poderá modificá-la posteriormente, se necessário.

8. Designa a sessão

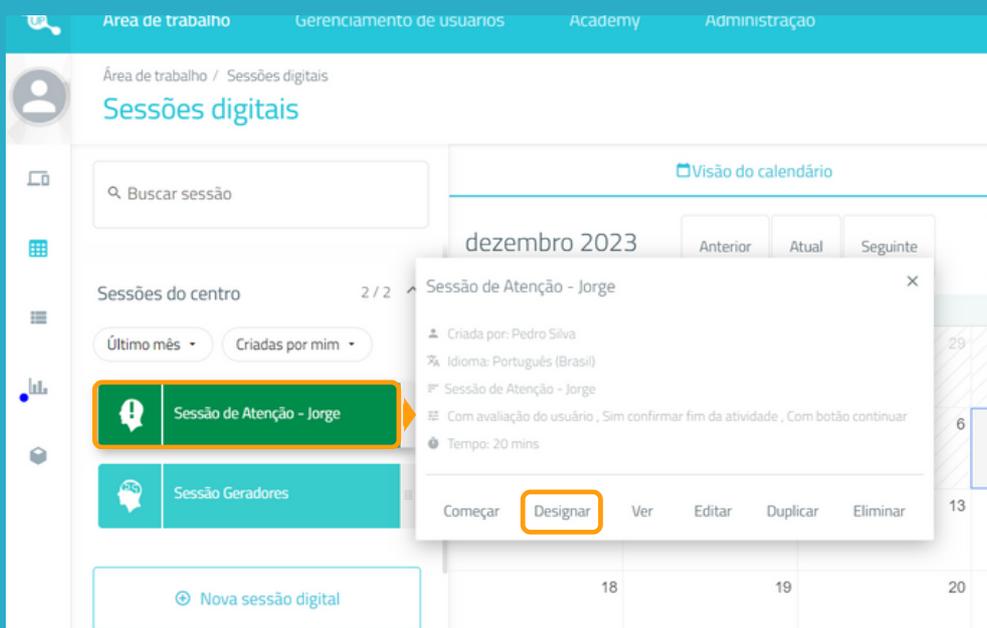

Clique na sessão ou arraste-a para a data desejada.

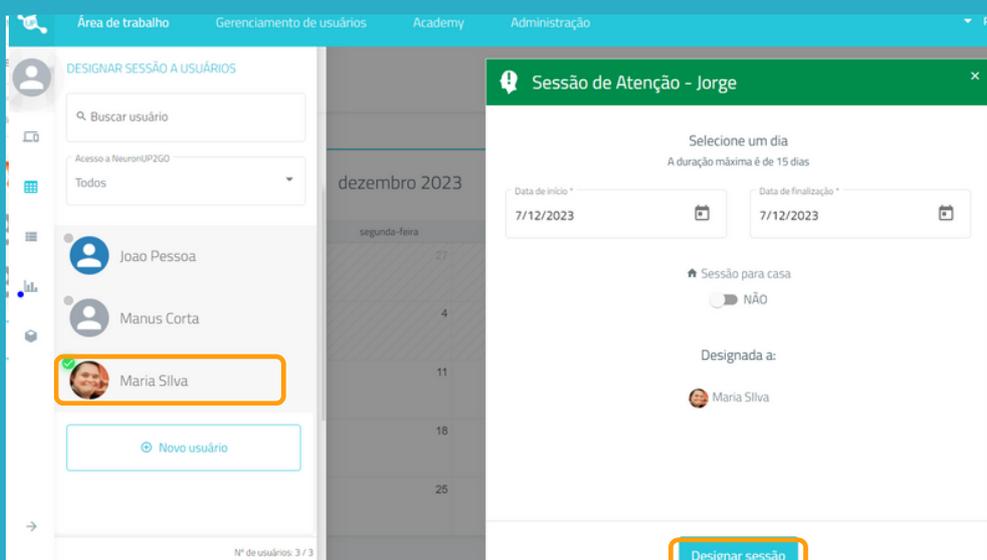


Selecione um ou mais usuários para designar-lhes a sessão*
* Ver Manual para trabalhar com vários usuários ao mesmo tempo.

Define a data de início e fim da sessão.

Ativa o filtro de sessão para casa se quiser que o usuário trabalhe remotamente.*
* Ver Manual NeuronUP2GO.


9. Começar a sessão

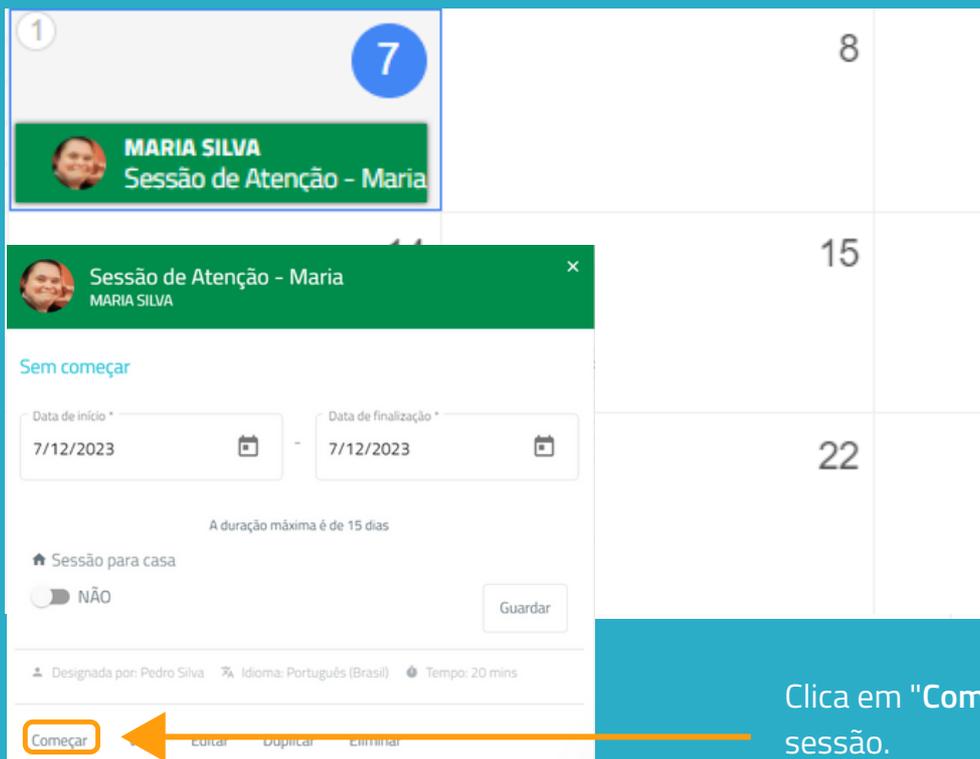

Para iniciar uma sessão, ela deve ser designada e agendada em um intervalo de datas que inclua o dia em que estamos.



Clica em "Começar" para iniciar a sua sessão.

10. Acompanhe a evolução da sessão

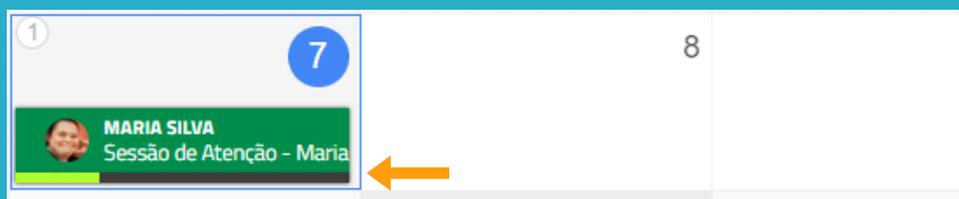

Depois que a sessão for iniciada, você poderá acompanhar seu progresso graças ao indicador verde.

Visão do calendário / visão da agenda

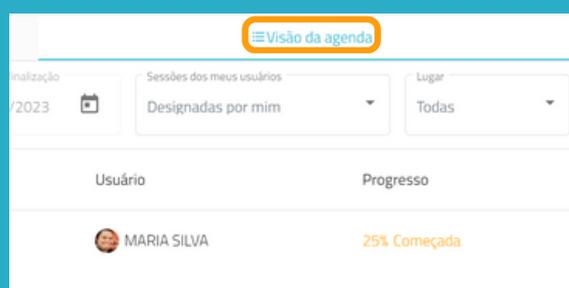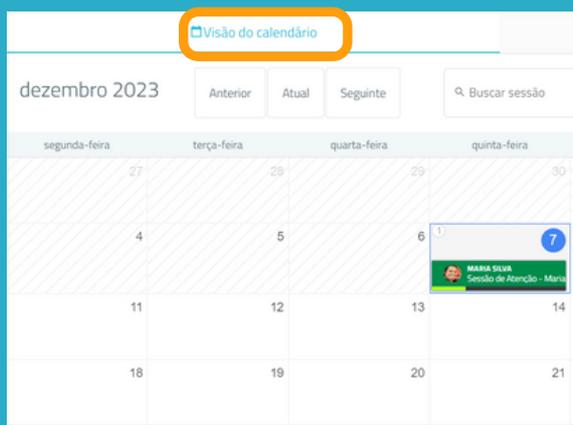

Você pode visualizar e organizar suas sessões com a vista de calendário (esquerda) ou a vista de agenda (direita).