



HANDBUCH NEURONUP2GO (Sitzungen für zu Hause)




1. Legen Sie einen Patienten an

"Patientenverwaltung" > "Neuer Patient"



2. Erstellen Sie einen NeuronUP2GO Zugang


Patientenprofil > "Zugangsdaten bearbeiten"

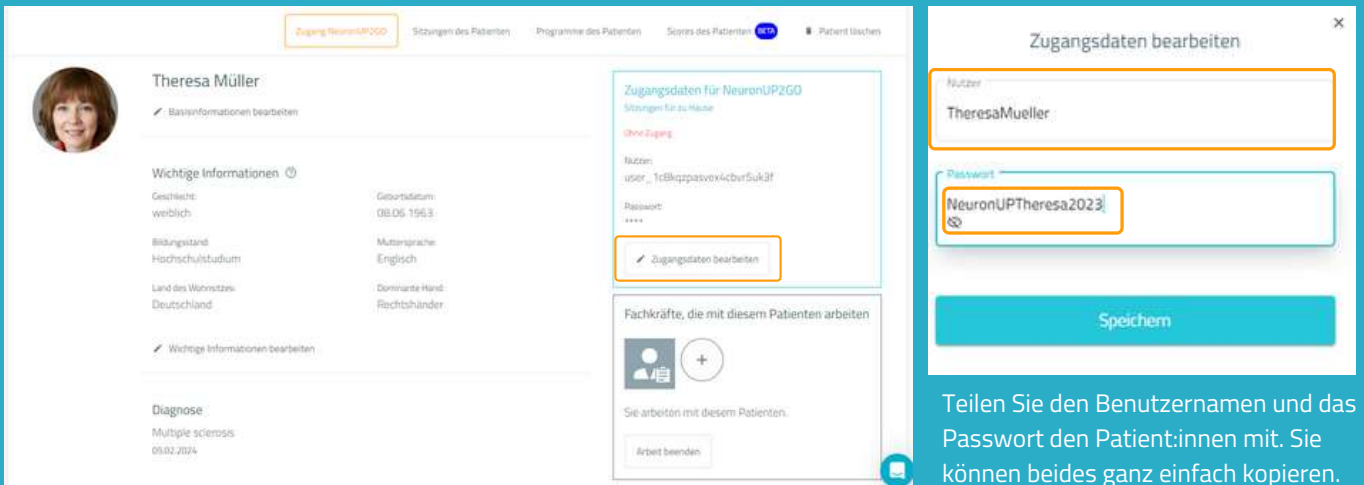


Teilen Sie den Benutzernamen und das Passwort den Patient:innen mit. Sie können beides ganz einfach kopieren.

3. Fügen Sie NeuronUP2GO Monate hinzu

"Patientenverwaltung" > "NeuronUP2GO"

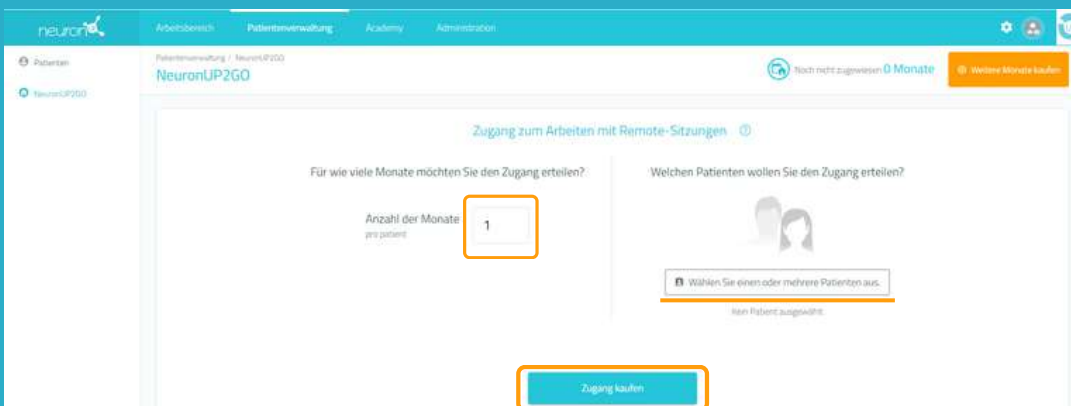

Sie können eine beliebige Anzahl an Monaten verschiedenen und mehreren Patient:innen zuweisen.

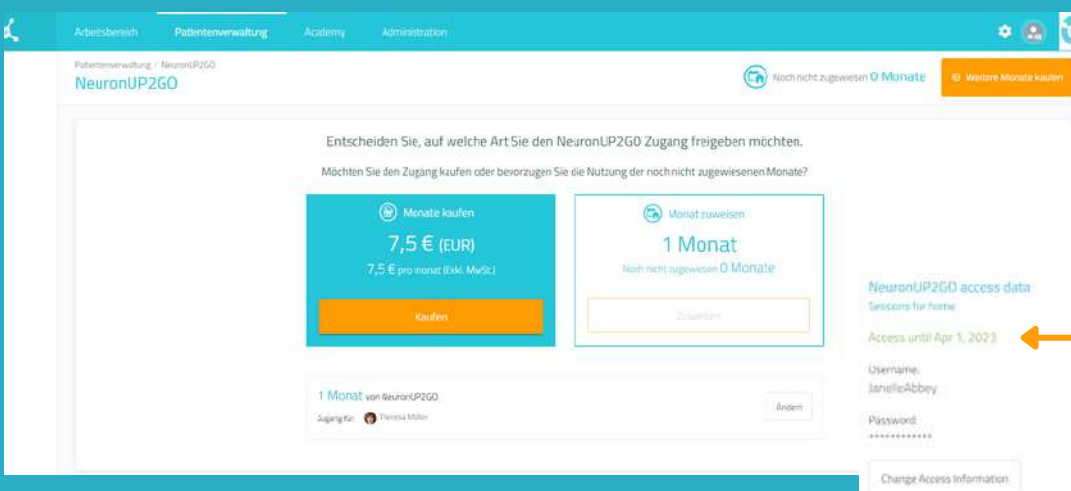

Sie können zusätzliche Monate kaufen oder Monate, die Sie bereits gekauft haben, zuweisen. (Im Beispiel müssen wir zusätzliche Monate kaufen, da wir keine mehr zuweisen können).




Ihr Patient hat nun einen **Remote-Zugang** (Sie können sehen bis zu welchem Tag der Zugang aktiviert ist).


4. Sitzungen erstellen und zuweisen

Klicken Sie auf "Digitale Sitzungen"

Klicken Sie auf "Zuweisen" in der ausgewählten Sitzung

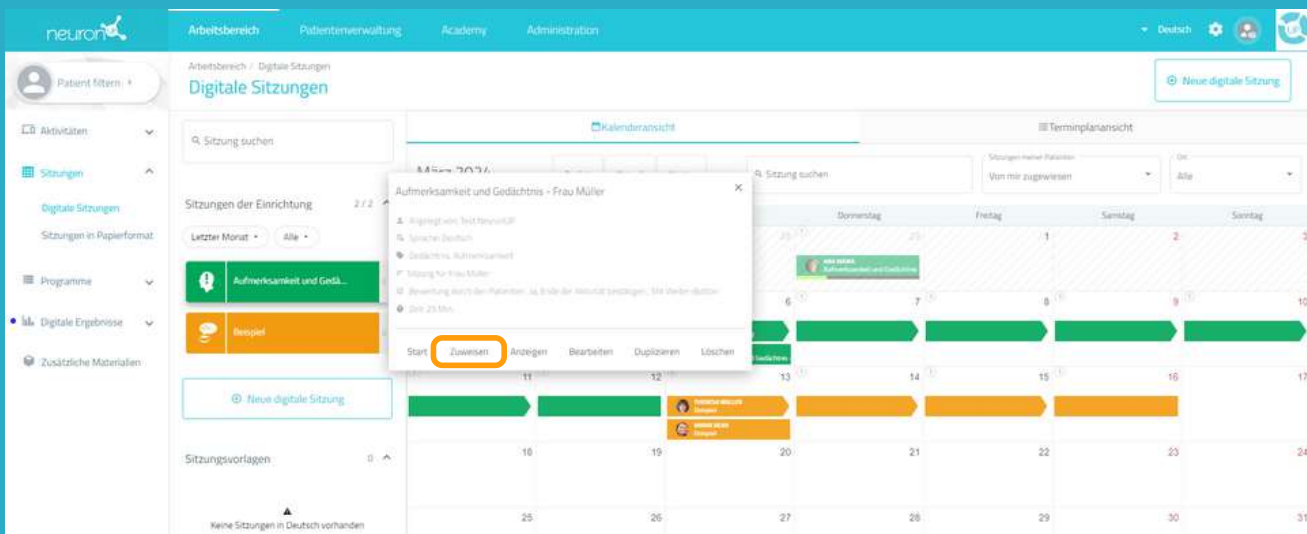

Wählen Sie den Patienten aus (mit einem aktiven NeuronUP2GO Zugang).
Aktivieren Sie "Sitzung für zu Hause".

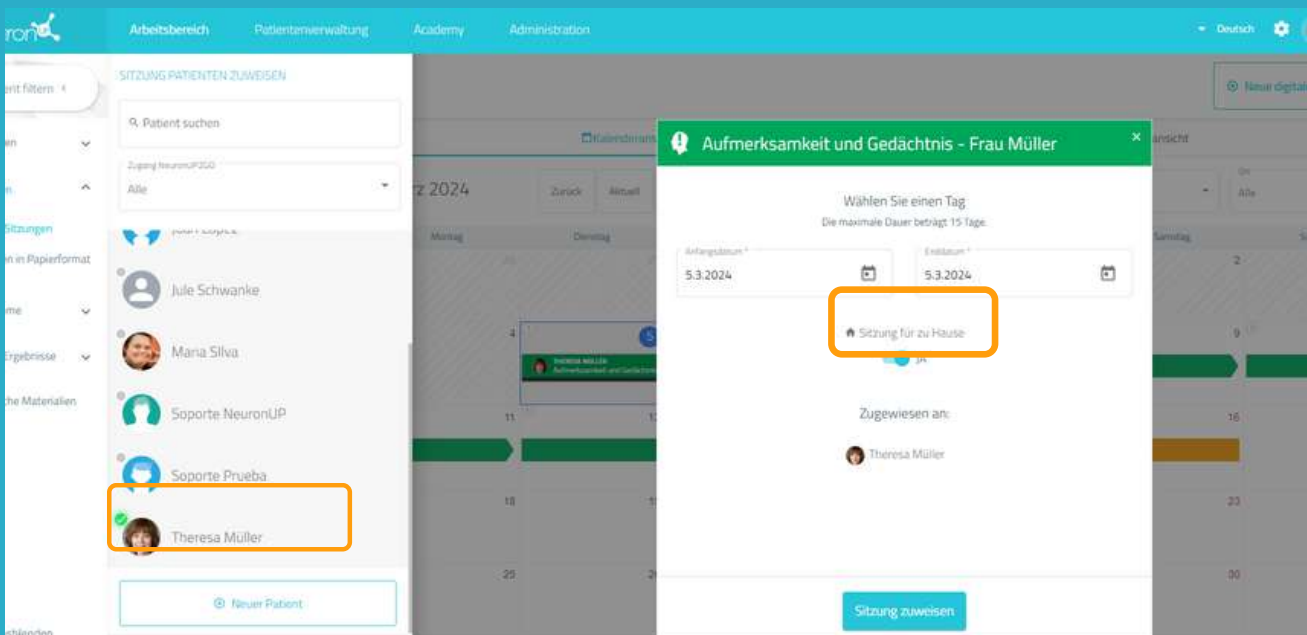

5. Verfolgen Sie den Fortschritt der Sitzung in Echtzeit

Wenn sich Ihr Patient von zu Hause aus einloggt und die Sitzung startet, können Sie den Fortschritt anhand der Anzeige im Kalender genau verfolgen.

