

HANDBUCH

MIT MEHREREN PATIENTEN
GLEICHZEITIG ARBEITEN






Mit NeuronUP können Sie mit mehreren Patient:innen an verschiedenen Geräten gleichzeitig arbeiten.




Damit dies funktioniert, müssen Sie sich erfolgreich mit Ihren Zugangsdaten an jedem der Computer oder Geräte der Patient:innen einloggen und die Sitzung, die Sie für die jeweiligen Patient:innen erstellt haben, starten.

1. Sitzung zuweisen

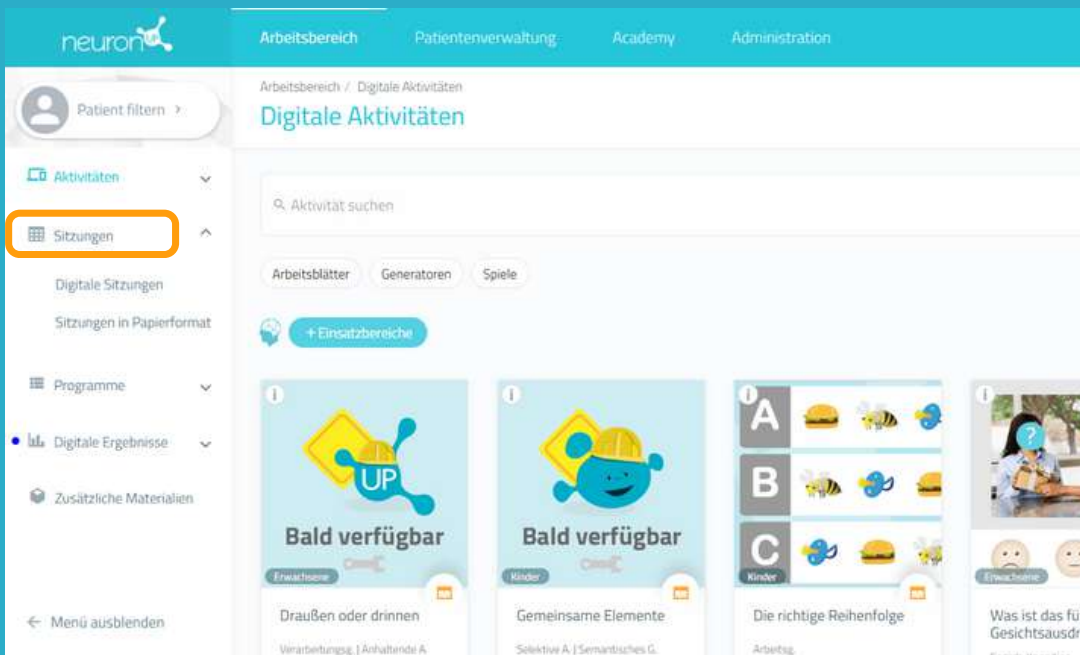


Klicken Sie im Menü auf "Sitzungen" und dann auf "Digitale Sitzungen".

2. Wählen Sie eine Sitzung aus und klicken Sie auf "Zuweisen"

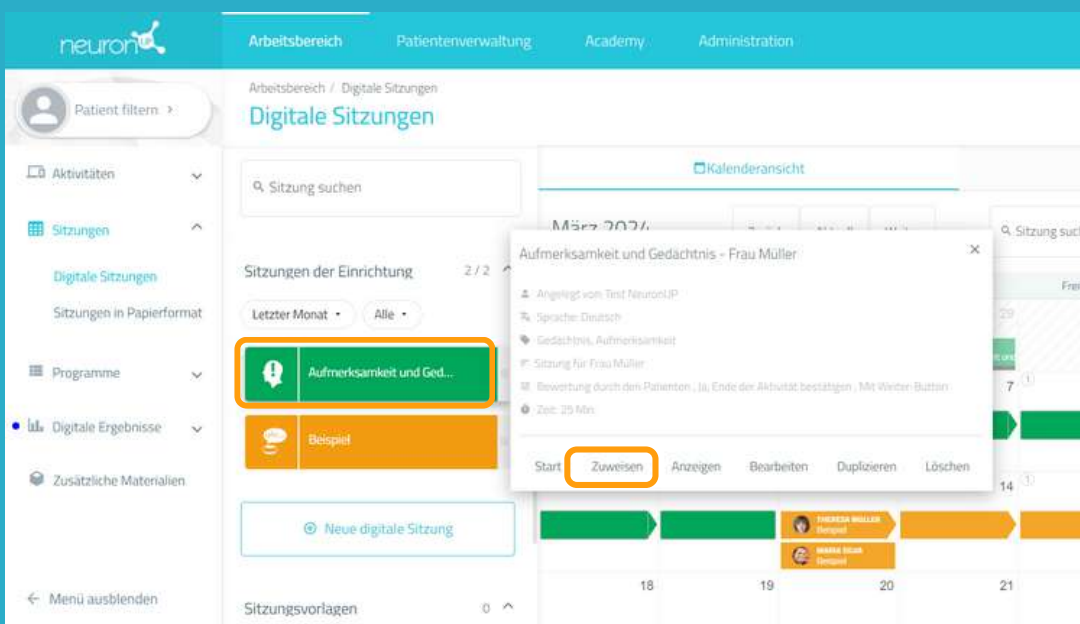

Klicken Sie auf die Sitzung und dann auf "Zuweisen" oder ziehen Sie die Sitzung in den Kalender auf das gewünschte Datum.


3. Wählen Sie die Patient:innen aus, denen Sie die Sitzung zuweisen möchten

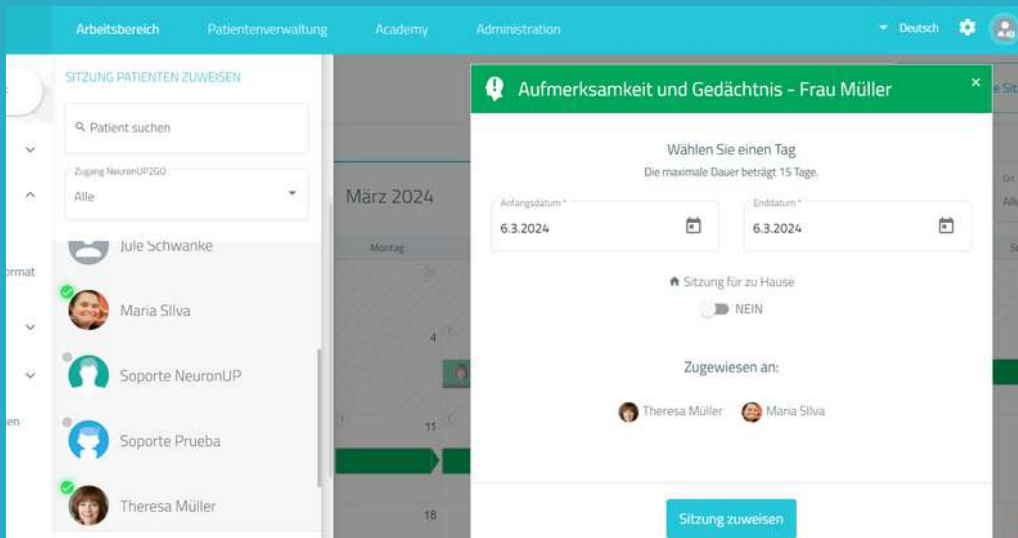

In der Liste der Patient:innen können Sie auswählen, mit wem Sie in dieser Sitzung arbeiten wollen.

Wichtig:

Damit die Patient:innen **gleichzeitig** aber jede:r für sich arbeiten kann, benötigen Sie pro Patient:in jeweils ein Gerät.

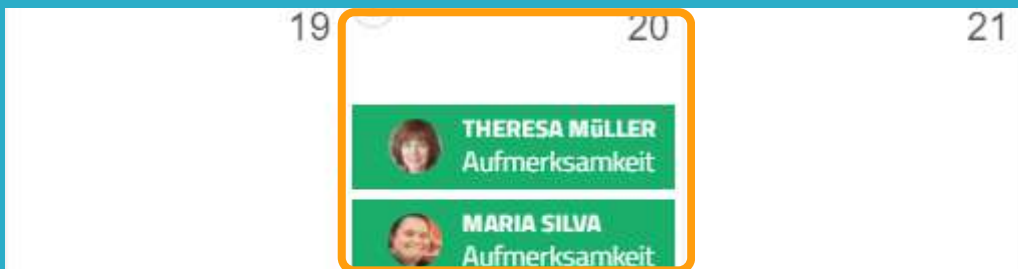

Beispiel: damit Sie mit 2 Patient:innen **gleichzeitig** arbeiten können, benötigen Sie 2 Computer oder 2 Tablets.

4. Gehen Sie zum Gerät des ersten Patienten und klicken Sie auf "Start" in der Sitzung


Ab hier müssen Sie den Prozess auf jedem Gerät der Patient:innen wiederholen.



Sobald Sie sich am ersten Gerät mit Ihren Zugangsdaten angemeldet haben, klicken Sie auf "Sitzungen".

Wählen Sie die Sitzung des Patienten aus (in diesem Fall Aufmerksamkeit und Gedächtnis) und klicken Sie auf "Start".


Die Sitzung der Patient:innen startet auf dem jeweiligen Gerät

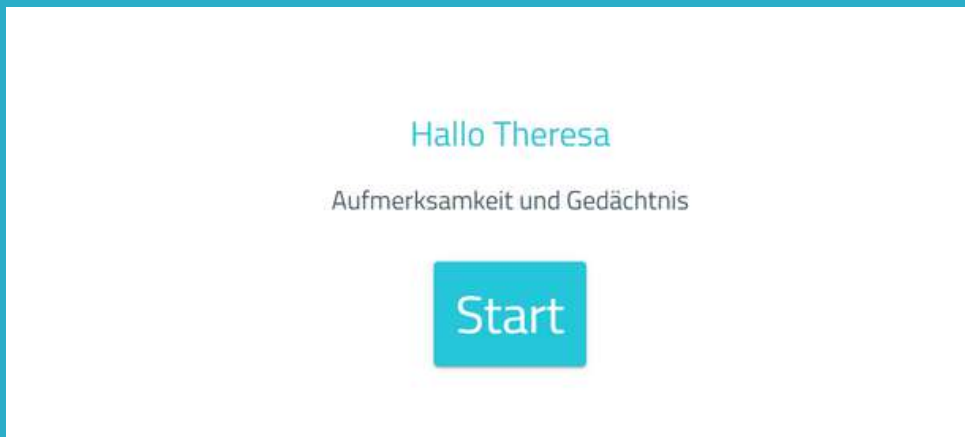


Ab diesem Punkt ist die Sitzung sicher.

Der Patient hat nur Zugriff auf seine eigene Sitzung.

Klicken Sie einfach auf "Start", um mit der Arbeit zu beginnen.

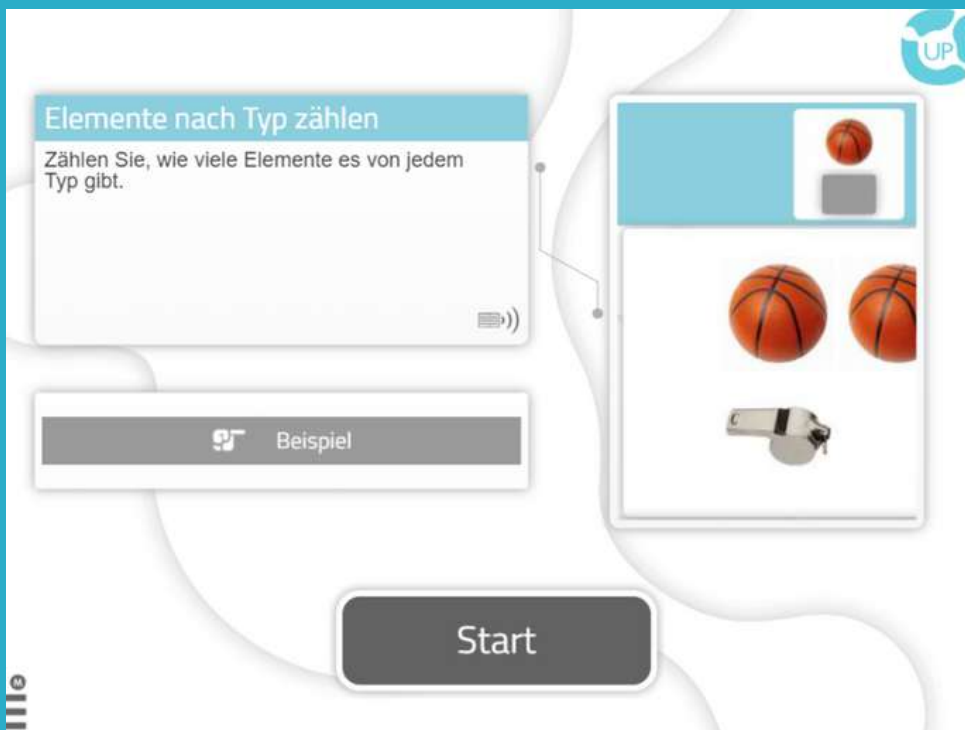

Gehen Sie zum zweiten Gerät

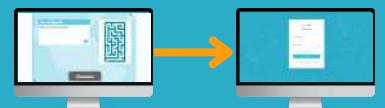

Wiederholen Sie den oben beschriebenen Prozess.

Melden Sie sich mit Ihren Zugangsdaten auf dem Gerät des zweiten Patienten an.

neuronUP

Anmelden

Nutzer/E-Mail *


Beispiel@neuronup.com

Passwort *


Haben Sie Ihr Passwort vergessen?

ANMELDEN

Arbeiten Sie nicht mit NeuronUP? Klicken Sie auf NeuronUP - Testversion!

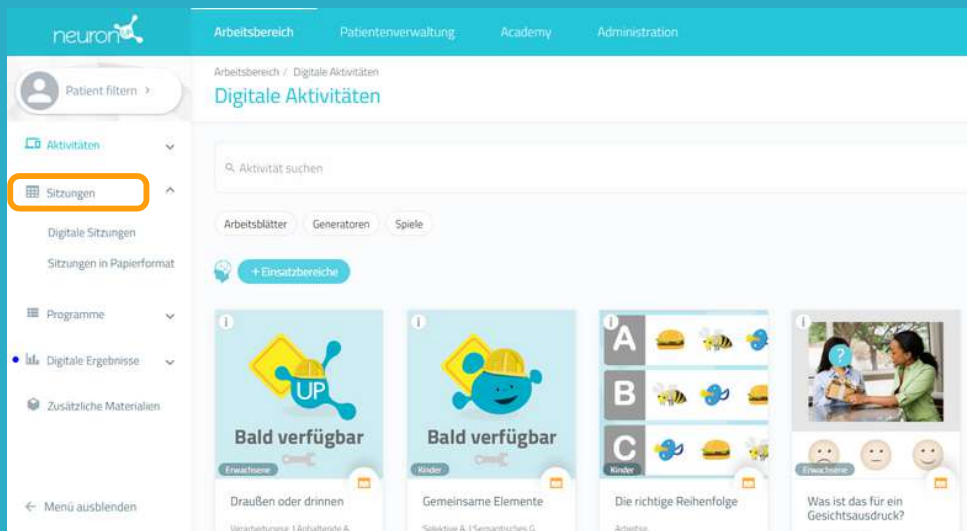

Klicken Sie auf "Digitale Sitzungen".

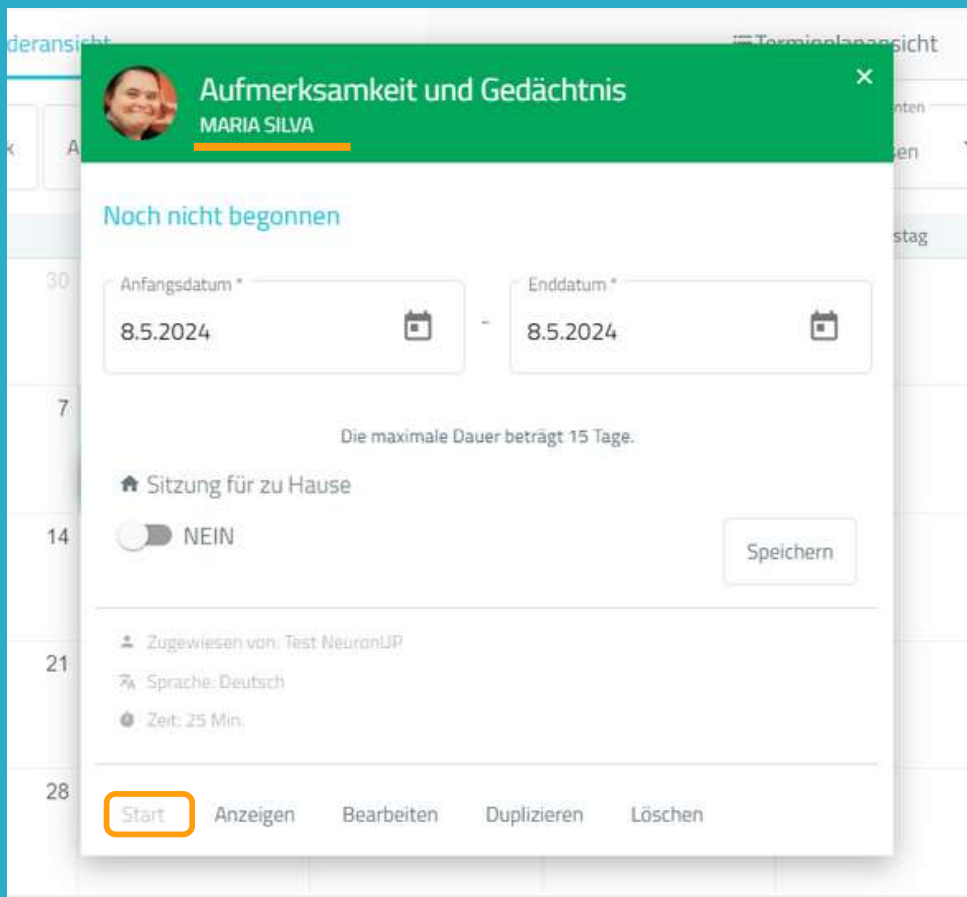

Wählen Sie die Sitzung des Patienten aus, in diesem Fall Maria, und klicken Sie auf "Start".



Starten Sie die Sitzung.

Wiederholen Sie den Prozess für alle Patient:innen, denen Sie die Sitzung zuweisen möchten.