



## MANUALE DI NEURONUP2GO (SEDUTE PER CASA)




## 1. Crea un paziente

"Gestione dei pazienti" > "Nuovo paziente".



## 2. Crea i dati di accesso a NeuroNUP2GO


Profilo del paziente > "Modifica dati di accesso"

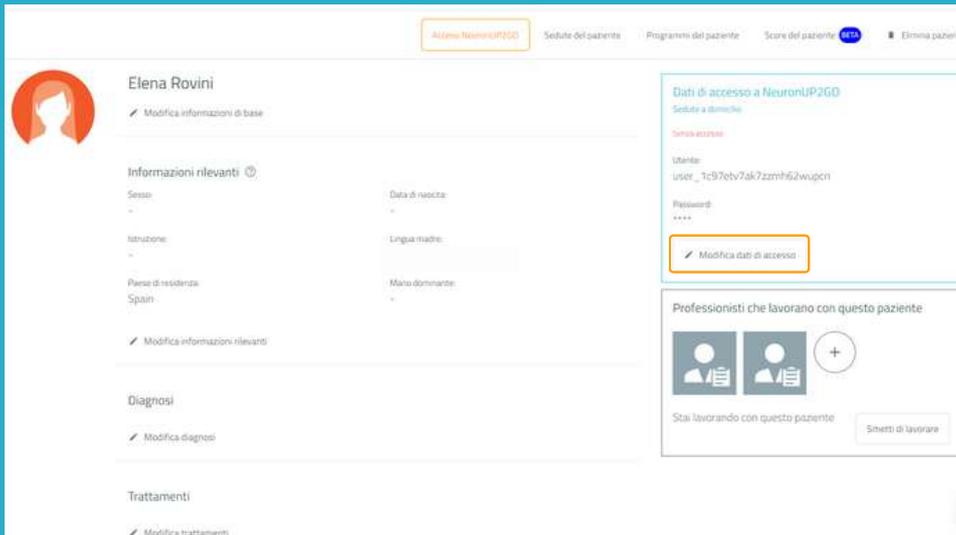


Copia la password per inviarla al paziente insieme al suo nome utente.

## 3. Assegna i mesi di NeuronUP2GO

"Gestione dei pazienti" > "NeuronUP2GO"

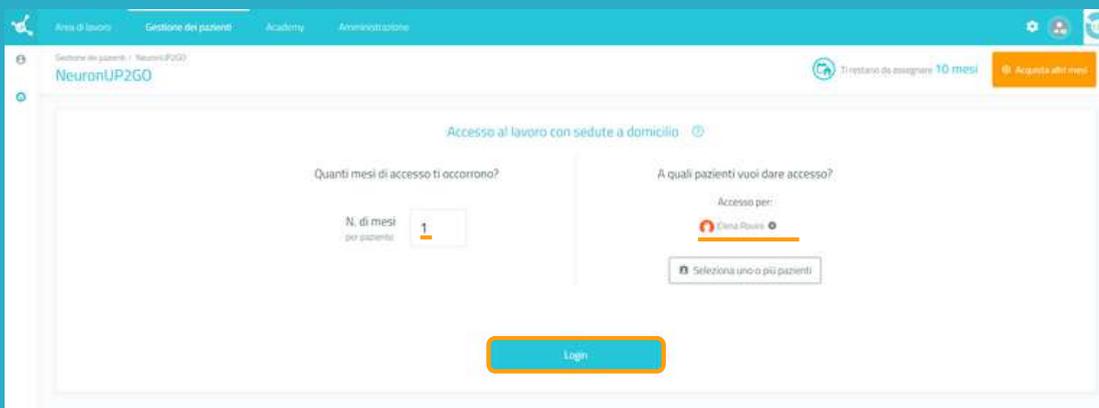

È possibile assegnare uno o più mesi a uno o più pazienti.

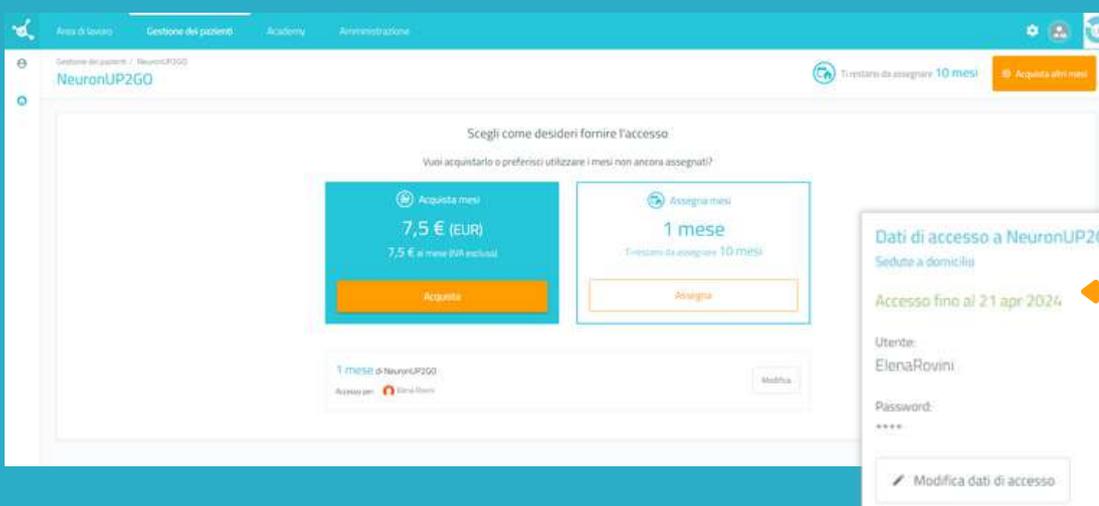

È possibile acquistare mesi aggiuntivi o assegnare i mesi già in possesso. (10 nell'esempio).




Il paziente ha ora accesso da remoto (puoi vedere fino a quale giorno sarà in grado di accedere).


## 4. Crea e assegna una seduta per casa

Clicca su "Sedute digitali"

Clicca su "Assegna" nella seduta scelta.

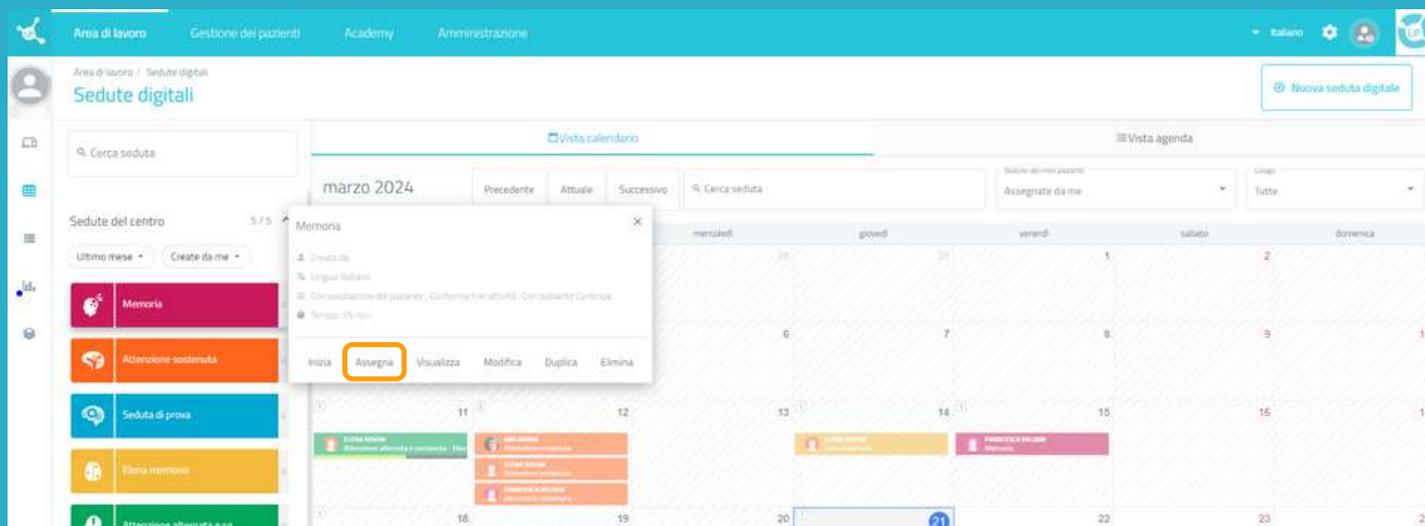

Scegli il paziente (con l'accesso da casa attivo).  
Attiva il filtro "Seduta a domicilio".

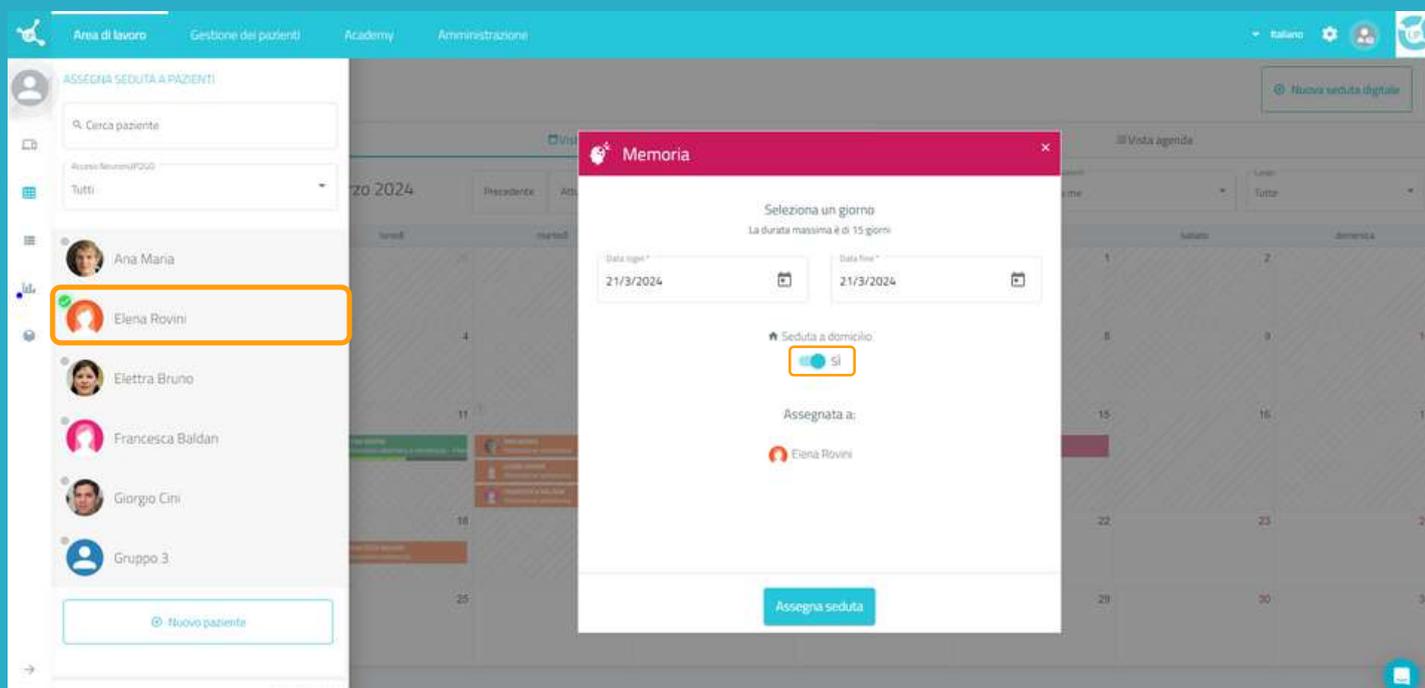

## 5. Segui dal vivo il progresso della seduta

Quando l'utente si connette da casa e inizia la seduta, sarà possibile vedere i suoi progressi grazie all'indicatore mostrato nell'immagine.

