

MANUAL

TRABAJAR EN GRUPO






Con NeuronUP puedes hacer que tus usuarios trabajen en grupo. Para ello, utiliza un único dispositivo (ordenador, tablet o proyector, en función del número de usuarios).


1. Crea un perfil de usuario para el trabajo en grupo

Es importante crear un perfil específico para trabajar en grupo, para que los resultados de un usuario no se distorsionen cuando se registren.

1. Para ello, ve a "Gestión de usuarios".

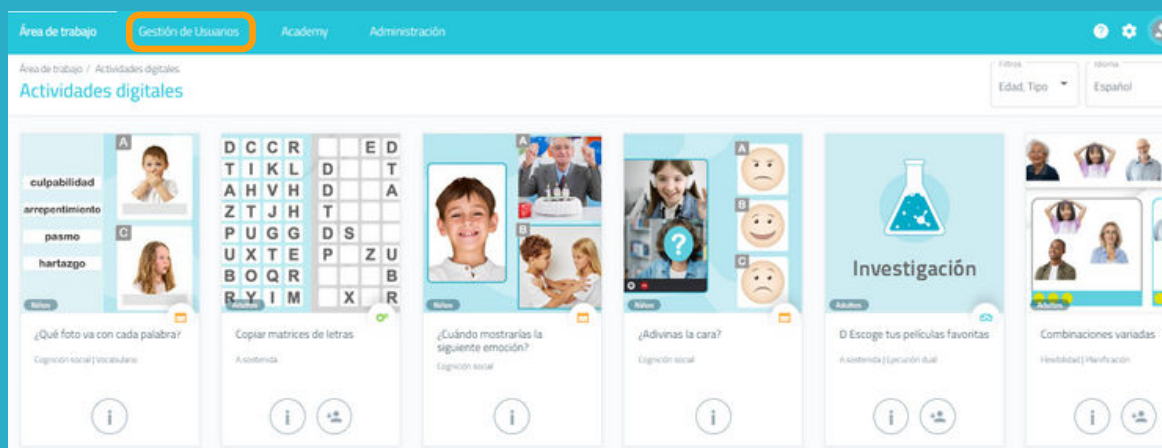

2. Pulsa en "Nuevo usuario", en la parte superior derecha.

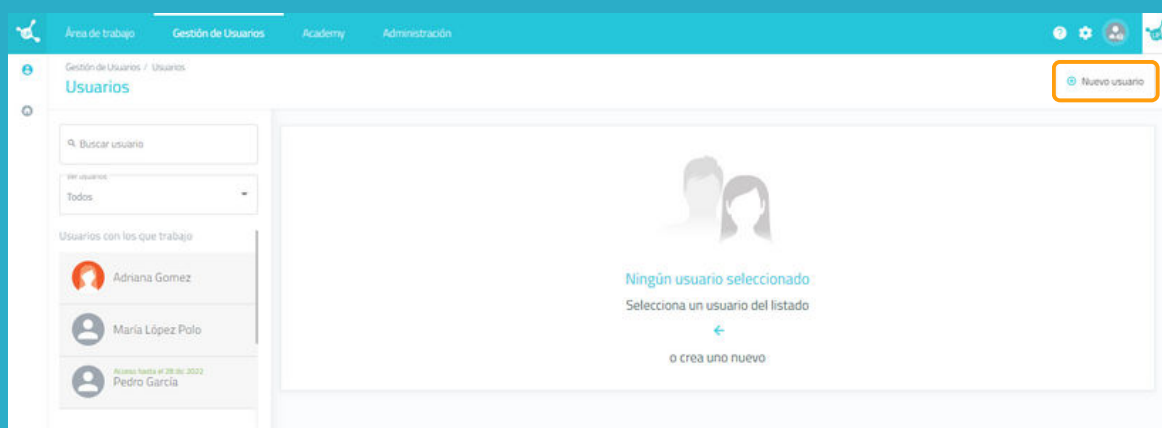

2. Rellena los datos del perfil

Nuevo usuario

Nombre * Grupo

Apellidos * 3

Sube una foto o selecciona una imagen predeterminada

Subir imagen

Crear

Puedes poner el nombre que creas más apropiado para tu perfil de grupo de trabajo.




En el siguiente ejemplo, ponemos "Grupo" para el nombre y "3" para el apellido.

3. Asigna una sesión al grupo de trabajo

Pulsa en "Sesiones digitales".

Elige una sesión y pulsa en ella o arrástrala hasta la fecha que quieras para asignarla.

Elige el usuario llamado "Grupo 3" y pulsa en "Asignar sesión".

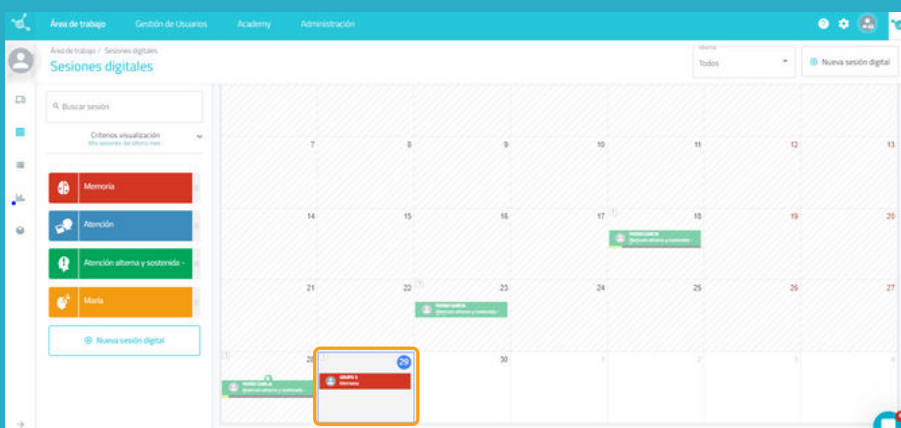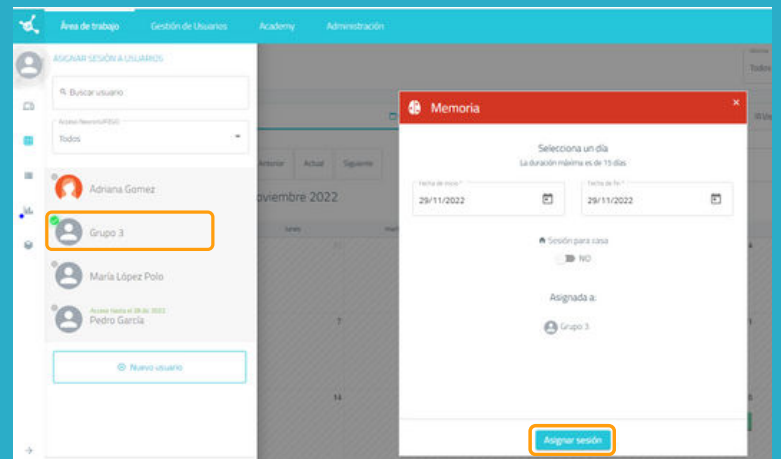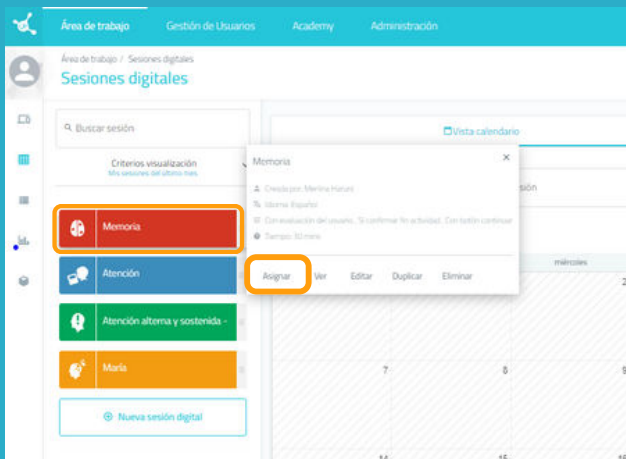

Una vez que el dispositivo de trabajo y los usuarios estén listos para trabajar juntos, pulsa en la sesión y luego en "Empezar".